



Instruksjon for bruk av de nye Eurotrol kontrollflaskene Hemotrol - Hemotrol Duo - Glucotrol NG - Albutrol


La kontrollmaterialet oppnå romtemperatur i 15 minutter før du starter med blanding.

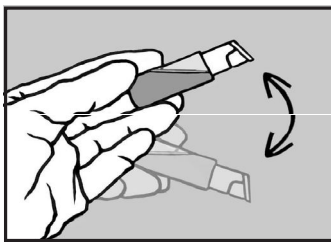


- 1 Bland flaskens innhold forsiktig 8-10 ganger - 30 sekunder for Hemotrol - Rist i 30 sekunder for Albutrol.

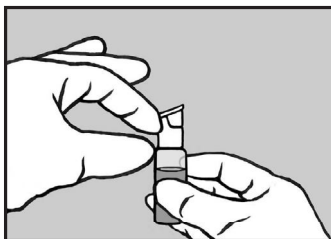


- 2 Hold flasken rett opp og knipskorken bestemt flere ganger for å sikre at det ikke ligger noe kontrollvæske igjen i dråpetuten.

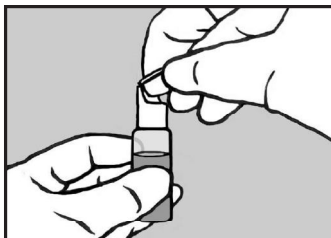


- 3 Åpne opp flasken ved å dra korken opp.

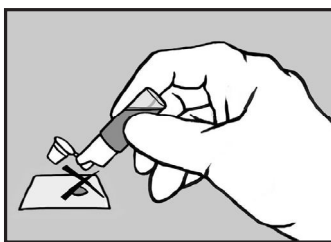

- 4 Ikke fyll kyvetten direkte fra flasken. Legge en dråpe med kontrollmateriale på et hydrofobt underlag, for eksempel en plastfim. Ikke bruk den første dråpen.

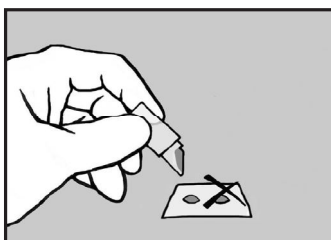

- 5 Fyll kyvetten ifølge produsentens anvisning. Legg kyvetten i instrumentet for analysering.

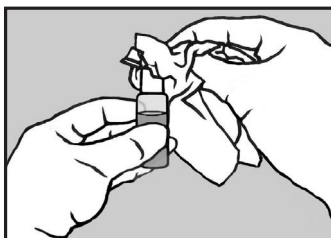

- Etter hver bruk, tørk av overflødig kontrollmateriale fra dråpetuten og fra korken, med et rent tørkepapir. Klikk korken tilbake på dråpetuten så flasken er tett.

