

# Viser ditt HemoCue WBC DIFF feilkodene Err30, Err60 eller Err90?

Da trenger optikkenheten rengjøring!! Se prosedyren på baksiden.



+




HemoCue Cleaner Plus

For å unngå feilkoder pga. smuss anbefaler vi rutinemessig rengjøring 1 gang i måneden.

 TRIOLAB

- **Obs! Instrumentet skal være avslått før rengjøring!**

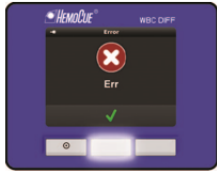


Instrumentet viser en feilkode.



Slå av instrumentet



Før inn Cleaner Plus langs med kvvetteholderen. La den ligge der i 10 min. **Obs! logoen opp**

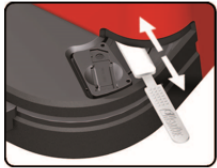

Rengjør optikkenheten inn/ut og venstre/høyre **x 2 Cleanere**



Vent 15 minutter før instrumentet slås på.