



QuickVue In-Line Strep A test

Unikt format - Enkleste Strep A hurtigtest på markedet



- Like mange reagensflasker som testkassetter.
- Ingen dråper å telle

Gjør det mulig for doktoren å ta prøven selv og få resultatet under konsultasjonen, mens pasienten fortsatt er til stede

Hvis legen vil det.

Spesifikasjoner

Testkomponentene er individuelt pakket:


- en prøvetakningspinne
- en testkassett
- egen reagensampulle per testkassett

Målemetode:	Immunologisk
Måletid:	5 minutter
Sensitivitet:	92%
Spesifisitet:	99%
Oppbevaring:	i romtemperatur (15 - 30 °C)
Kvalitetskontroll:	innebygd intern kontroll i tillegg positiv og negativ kontroll inkludert i hver eske
Antall testkit pr. eske:	25
Varenummer:	00343 SC




Enkel testprosedyre

- 1** Prøvetakningspinnene som medfølger utstyrs pakken **må** benyttes

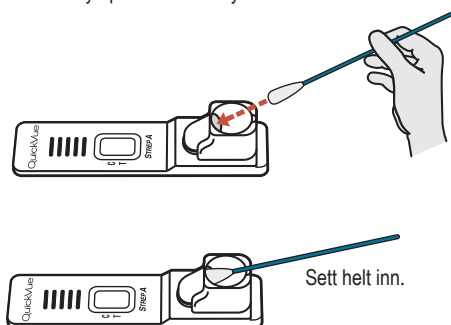


- 2** Press hardt én gang for å brette.

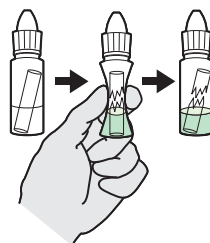

- 3**



- 4** Ta av skrukorken. Hold ampullen vertikalt og fyll kammeret raskt til kanten (ca. 8 dråper)

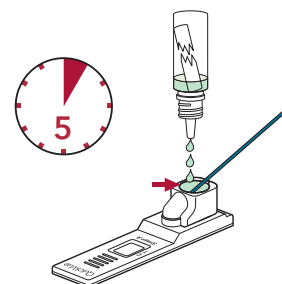

Enkel og sikker resultatavlesning

To forskjellige farger på kontroll- og testlinjen for enkel avlesning og tolkning.



Negativt resultat



Positivt resultat



Ugyldig resultat

TRIO231_150223

Triolab AS er et av Norges ledende firmaer innen diagnostika og analyseutstyr. Vi markedsfører og selger analyseinstrumenter og tilbehør, hovedsakelig rettet mot sykehus, også primærhelsetjeneste, men også mot veterinærer og forskningsinstitusjoner.